

## Rossmax NI60 Dětský kompresorový inhalátor Návod na obsluhu



### Úvod

Ďakujeme, že ste si zakúpili kompresorový inhalátor Rossmax NI60. Pri správnej starostlivosti a používaní vám poskytne mnoho rokov spoľahlivých služieb. Tento prístroj pracuje na štandardné napájanie zo siete. Liečivo je inhaláciou podávané rýchlo, bezpečne a pohodlne. Prevedenie inhalácia je ideálne pre všetky vekové kategórie. Odporúčame, aby ste dôkladne preštudovali tento návod na obsluhu. Inhalátor by mali byť používaný podľa odporúčania lekára alebo terapeuta. **Poznámka:**

Váš inhalátor je určený pre použitie pri liečbe astmy, CHOCHP (Chronická obštrukčná choroba pľúc) a ďalších respiračných ochorení, pri ktorých je vhodné počas liečby podávať lieky inhalačnou metódou. Prosím, poradte sa so svojim lekárom, či predpísaný liek je určený pre inhalačnú terapiu. Dávkovanie a liečebný režim dodržujte podľa pokynov svojho lekára.

Toto zariadenie spĺňa ustanovenia smernice ES 93 42 / EHS / ES a európske normy EN13544-1: 2007 + A1: 2009 pre liečbu dýchacích ochorení - Časť 1: nebulizačné systémy a ich časti.

Pred použitím si pozorne prečítajte tento návod a uschovajte ho pre budúce nahliadnutie. **Upozornenie** Pri prevádzke inhalátora dbajte všeobecných bezpečnostných opatrení. Tento prístroj by mal byť používaný len na určený účel tak, ako je popísané v tejto príručke a v príbalových letákoch použitých liečiv, podľa dávkovania predpísaným lekárom. Toto zariadenie nie je možné použiť na inhalačnú anestéziu a umelú ventiláciu.

### Bezpečnostné inštrukcie

Pred použitím si preštudujte bezpečnostné inštrukcie

- Prístroj neponárajte do vody ani inej kvapaliny.
- Nepoužívajte ho pri kúpaní.
- Nesiahajte na jednotku, ktorá sa dostala do vody - okamžite odpojte jednotku od napájania.
- Nepoužívajte prístroj v prípade, že má poškodené časti (vrátane konektora), ak bola ponorená do vody či po páde alebo náraze. V uvedených prípadoch odošlite prístroj do opravy.
- Prístroj by nemal byť používaný, ak sú v miestnosti horľavé plyny, kyslík alebo aerosólový sprej.
- Udržujte vetracie otvory voľné. Nestavajte prístroj na mäkký povrch, kde môžu byť otvory zablokované.
- Nespúšťajte prístroj, ak je nebulizačná nádoba prázdna.
- Ak dôjde počas prevádzky k akejkoľvek abnormalite, prestaňte inhalátor používať a zaistite jeho posúdenie autorizovaným servisom.
- Počas prevádzky nenechávajte prístroj bez dozoru.
- Nenakláňajte, netraste ani inak nepohybujte prístrojom počas prevádzky.
- Pred plnením, čistením, údržbou a po každom použití prístroj odpojte od elektrickej siete.
- Nepoužívajte iné než výrobcom odporúčané príslušenstvo.
- Nezapájajte ani neodpájajte napájací adaptér do elektrickej zásuvky mokrymi rukami.
- Nerozoberajte ani sa nepokúšajte opraviť prístroj.


### Prevádzkové upozornenia

- V priebehu používania inhalátora deťmi alebo osobami so zníženými zmyslovými schopnosťami zaistite dohľad.
- Chráňte oči pred mlžiny.
- Maximálna kapacita nebulizačnej nádoby je 5 ml, nemala by byť preplnená
- Nepoužívajte tento prístroj pri riadení motorového vozidla.
- Pokiaľ dôjde k akejkoľvek ťažkosti či abnormalite, okamžite prestaňte prístroj používať.
- skladovanie
- Neukladajte prístroj na priamom slnečnom žiarení, pri vysokej teplote a vlhkosti.
- Udržujte prístroj mimo dosahu malých detí.
- Vždy majte prístroj odpojený od elektrickej siete, pokiaľ nie je používaný.
- čistenie upozornenie
- Skontrolujte pred každým použitím vzduchový filter, rozprašovač, náustok a ďalšie súčasti. Znečistené alebo opotrebované časti by mali byť vymenené.
- Neponárajte prístroj do vody ani inej kvapaliny. Môže dôjsť k poškodeniu prístroja.
- Pred čistením odpojte zariadenie z elektrickej zásuvky.
- Vyčistite všetky potrebné diely po každom použití, ako je uvedené v tejto príručke.
- Po ukončení terapie vždy zlikvidujte zvyšky liekov.

Pre každú terapiu použite vždy čerstvé liečivo.  
 • Vzduchovú trubicu nechajte vždy vyschnúť.

### Zdravotnícke upozornenie


Tento návod a výrobok nie sú náhradou za rady a odporúčania vášho lekára. Ak máte nejaký zdravotný problém, okamžite sa poraďte s lekárom.

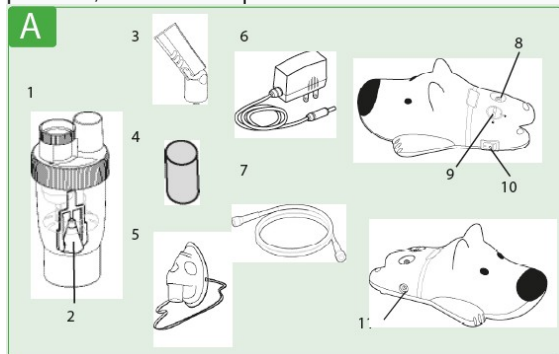

### Popis častí inhalátora (obr. A)


1. Nebulizačná nádoba
2. Tryska
3. Náústek
4. Vzduchový filter
5. Dětská maska
6. Síťový napájací zdroj
7. Hadice
8. Výstup vzduchu z inhalátora
9. Prostor vzduchového filtra
10. Hlavní vypínač 0 / I
11. Napájecí konektor

### Nastaviteľný ventil (obr. B)

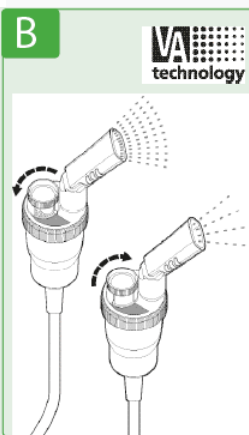

Patentovaný nastaviteľný ventil je schopný dodať množstvo mlžiny podľa potrieb každého užívateľa bez ohľadu na viskozitu liečiva. VA technológia umožňuje nastaviť množstvo mlžiny v rozmedzí 0.08- 0,2 ml / min pri konzistentnej veľkosti častíc. Rýchlosti rozprašovanie môže byť nastavená užívateľom veľmi jednoduchým spôsobom bez výmeny dielov. Vyšší výkon,

kedy je ventil plne otvorený, je vhodný pre vyššiu viskozitu liekov a užívateľov s väčšou dýchacou kapacitou. Nižší výkon s uzavretým ventilom bude vhodnejšie pre deti a dojčatá s nižšou kapacitou dýchania.

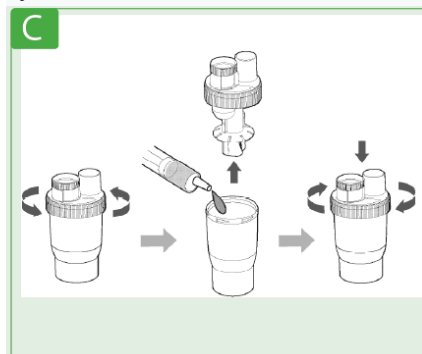

### Zostavenie inhalátora (obr. C)


Postupujte podľa pokynov pre čistenie pred prvým použitím alebo potom, čo nebol prístroj dlhšiu dobu používaný.

**NEZABUDNITE:** Pred čistením, plnením vždy odpojte prístroj od napájania a uistite sa, že vypínač je prepnutý do polohy OFF.

1. Umiestnite kompresor na rovný, stabilný povrch.
2. Jemným otočením rozoberte nebulizačnej nádobu.
3. Uistite sa, že tryska je správne nasadená.
4. Naplňte predpísaným množstvom lieku.
5. Zložte nebulizačnej nádobu. Uistite sa, že obe časti sú bezpečne nasadené.



**Varovanie:** Symbol na tomto produkte znamená, že ide o elektronický výrobok podľa európskej smernice 2012/19 / EÚ. Elektronické prístroje nutné likvidovať v súlade s miestnymi platnými predpismi, nie s domácim odpadom. Zariadenie, ktoré už nepotrebuje, vráťte do zberných nádob s elektroodpadom, do zberných dvorov apod. Nepatrí do košov s domácim zmiešaným odpadom!

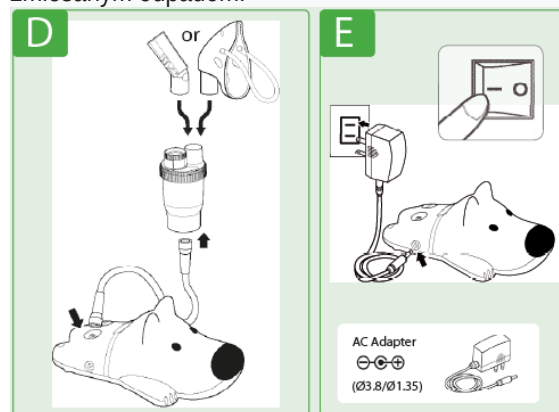

### Prevádzka inhalátora (obr. D)

Nebulizačnej nádobu nenakláňajte.

1. Jeden koniec vzduchovej hadice výstup vzduchu inhalátora.
2. Opatrne pripojte druhý koniec vzduchovej hadice ku konzole na spodnej časti nebulizačnej nádoby.
3. Pripojte náústok alebo masku na hornej časti nebulizačnej nádoby.
4. Kapacita zásobníka je 2-5 ml liečiva.

Poznámka:

Po každom použití:

1. Odpojte prístroj od zdroja napájania.
2. Nechajte prístroj 30 minút v pokoji.
3. Opatrne odpojte vzduchovú hadičku z rozprašovača a odstráňte všetky zostávajúce liečivo.
4. Postupujte podľa pokynov na čistenie.

### Napájací adaptér (obr. E)

1. Skontrolujte, či je vypínač v polohe "OFF".
2. Pripojte napájací konektor do zdiery na zadnej strane prístroja.
3. Zapojte adaptér do zásuvky.
4. Používajte iba autorizovaný napájací adaptér
5. Stlačte tlačidlo napájania do polohy "ON".

