



Návod na používanie inteligentnej ponožky Smart Sock od Owlet

Pre aký výrobok je tento návod na používanie určený?

Inteligentná ponožka Smart Sock 3

Inteligentná ponožka Smart Sock Plus

Čo nájdete v balení

Ponožky veľkosti 1, 2 a 3, pre každú veľkosť ponožka na pravú aj ľavú nožičku

Senzor inteligentnej ponožky Smart Sock

Základňa

Kábel základne

Napájací adaptér

Úvodná príručka

* Ponožky veľkosti 3 sú iba v balení inteligentnej ponožky Smart Sock Plus.

Ako funguje inteligentná ponožka Smart Sock od Owlet?



Senzor inteligentnej ponožky Smart Sock využíva pulzovú oxymetriu na získavanie údajov z nožičky spiacieho bábätka. Svetielko ponožky svieti cez pokožku a prítok krvi a hladina kyslíka sa odhaduje na základe toho, koľko svetla zachytí senzor.


Senzor inteligentnej ponožky Smart Sock zbiera údaje a posielajú ich do základne. Na základe týchto údajov vás základňa v prípade potreby upozorní. Základňa má za úlohu vás v prípade červeného alarmu včas upozorniť, preto ju odporúčame umiestniť tak, aby ste ju vždy počuli.

Ako funguje aplikácia

Ak je inteligentná ponožka Smart Sock pripojená k Wi-Fi sieti: Základňa prostredníctvom Wi-Fi siete odosiela informácie na cloud Owlet. Cloud Owlet tieto údaje umožňuje zobrazíť v aplikácii Owlet. Vďaka tomu si môžete všetky údaje prezerať v reálnom čase a dostávať oznámenia z aplikácie, nech ste kdekofvek.

Režim LAN (lokálne siete):

Ak chcete používať režim LAN, telefón musí byť pripojený k rovnakej Wi-Fi sieti ako základňa. Aplikácia pomocou Wi-Fi siete nadviaže počítačové spojenie s cloudom Owlet a bude prijímať údaje, dokým aplikáciu nezatvoríte a dokým nedôjde k zmene Wi-Fi siete aplikácie alebo základne.

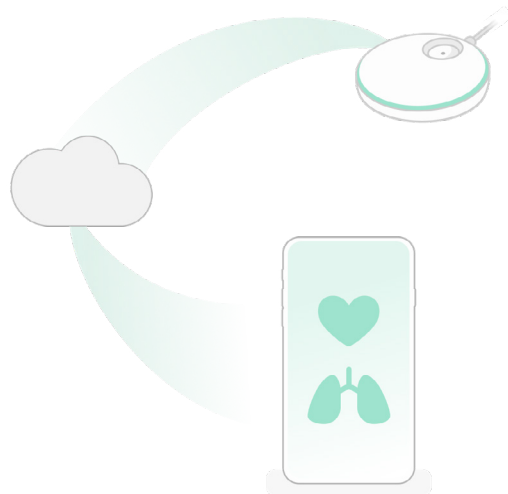

Ako nastaviť a používať inteligentnú ponožku Smart Sock od Owlet.

Požiadavky

Inteligentná ponožka Smart Sock od Owlet vyžaduje prístup k iOS alebo Android zariadeniu, na ktorom je nainštalovaná aplikácia Owlet Care. Informácie o minimálnych verziách operačných systémov nájdete v obchode s aplikáciami.

Inteligentná ponožka Smart Sock Plus je vhodná pre deti s maximálnou hmotnosťou 24,9 kg.

Čítanie nameraných hodnôt v reálnom čase, vzdialený prístup k aplikácii a niektoré funkcie aplikácie vyžadujú pripojenie k bezdrôtovej 2,4GHz sieti. Hotspot Wi-Fi siete a 5GHz sieť nie sú podporované.

Ak chcete nastaviť inteligentnú ponožku Smart Sock od Owlet:

① Stiahnite si aplikáciu Owlet.

Aplikácia je dostupná pre zariadenia iOS a Android.



Dobrý deň! Podme založiť účet.

E-mail

Heslo (minimálne 6 znakov)

Znova zadajte heslo

② Založte si účet

Ak si chcete založiť účet, postupujte podľa pokynov aplikácie.



Kto ste?

Meno

Priezvisko

Telefónne číslo

Dátum narodenia

PSČ



Práve vám bol poslaný e-mail
s potvrdzovacím kódom.

Znovu poslať e-mail.



Váš účet bol potvrdený. Vitajte
v rodine Owlet.

Domov >

· Pridať profil bábätka alebo zariadenie

Začíname



Viac informácií o inteligentnej ponožke Smart Sock od Owlet >

Máte zariadenie Owlet, ktoré chcete nastaviť?

Inteligentná ponožka Smart Sock 3

Nie >

Áno >

Aké zariadenie chcete nastaviť



Inteligentná ponožka Smart Sock 3 >



Inteligentná ponožka Smart Sock 2 >




Kamera >

③ Nastavte zariadenie

POZNÁMKA: Ak už máte účet Owlet a pridávate ďalšie zariadenie Owlet, postupujte podľa pokynov aplikácie a pridajte nové zariadenie.




④ Základňu pripojte k zdroju napájania a inteligentnú ponožku Smart Sock k základni.

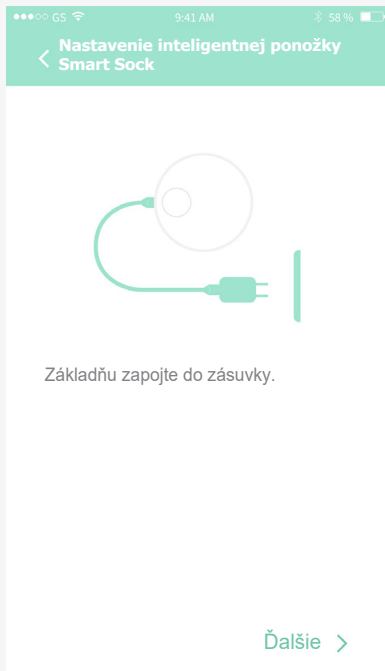


Podme základňu pripojiť k Wi-Fi sieti, aby ste si údaje mohli zobraziť v telefóne.

1. Prejdite do nastavenia Wi-Fi siete vo vašom telefóne a vyberte sieť „Owlet“.

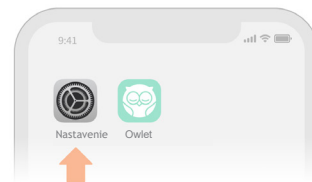

2. Vráťte sa do aplikácie Owlet.

Ak budete presmerovaní alebo sa zobrazí správa „Presmerovanie sa nepodarilo“, je to v poriadku! Stačí sa vrátiť do aplikácie Owlet.

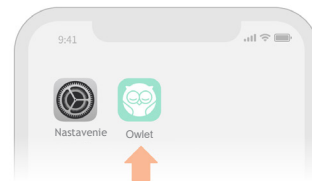

(Táto obrazovka platí iba pre iOS zariadenia.)



Váš účet bol potvrdený.
Vitajte v rodine Owlet!

Domov >

(Táto obrazovka platí iba pre Android zariadenia.)

Podľa pokynov aplikácie môžete pripojiť inteligentnú ponožku Smart Sock k Wi-Fi sieti, zaregistrovať sa a spárovať ponožku a v prípade potreby ponožku aktualizovať.

< Nastavenie Wi-Fi siete

Zvoľte zariadenie Owlet, ktoré chcete nastaviť.

 Owlet - 383G9f65

(Táto obrazovka platí iba pre Android zariadenia.)


GS 9:41 AM 58%

< Nastavenie Wi-Fi siete

Zvoľte router Wi-Fi siete.


(Zatiaľ nie je kompatibilný s 5,0GHz sieťami.)

 Wi-Fi sieť Novákocov

 Wi-Fi sieť vášho suseda s čudným názvom

 Jurský dom

 Kováčovci

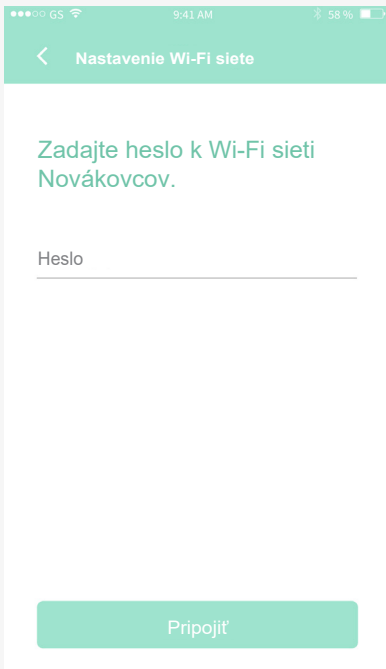

9:41 AM 58%

Nastavenie Wi-Fi siete

Rýchla kontrola

Pozrite sa na zadnú stranu základne a skontrolujte stav Wi-Fi siete.

Kontrolka Wi-Fi siete nesvieti. >

Kontrolka Wi-Fi siete svieti. >

9:41 AM 58%

Registrácia základne



Slaďte a podržte tlačidlo na základni (dokým sa nezvú dve pípnutia).

Registrácia môže po stlačení tlačidla trvať až 10 sekúnd.




9:41 AM 58%

Párovanie inteligentnej ponožky Smart Sock



Registrácia prebehla úspešne!


Inteligentnú ponožku Smart Sock pripojte k základni.

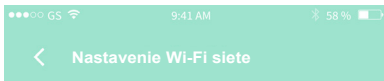

Inteligentná ponožka Smart Sock bola úspešne spárovaná!

Základňa by mala blikať bielo, čo znamená, že inteligentná ponožka Smart Sock sa nabíja.

Ďalej sa uistíme, že vaše zariadenie je aktualizované.

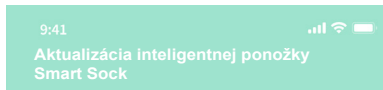

Aktualizácia inteligentnej ponožky Smart Sock 3

Počas aktualizácie neodpájajte základňu od napájania.



Už to bude...



Dôležité bezpečnostné pokyny

Správne nasadenie inteligentnej ponožky Smart Sock

Bezpečnosť vášho bábätka je pre nás na prvom mieste a vieme, že aj pre vás.

Uvedomte si prosím, že nesprávne nasadená ponožka môže byť pre bábätko nepohodlná a na nožičke sa môžu objaviť červené škvrny, otľaky alebo pluzgieri. Nožičku bábätka udržiavajte v suchu, používajte ponožku správnej veľkosti a dodržujte naše pokyny pre správne nasadenie ponožky.




Údržba inteligentnej ponožky Smart Sock

Inteligentnú ponožku Smart Sock a senzor aspoň jedenkrát týždenne ručne vyperte v jemnom pracom prípravku. Pred ďalším použitím nechajte ponožku úplne vyschnúť.

Zásady bezpečného spánku

Nezabudnite vždy dodržiavať zásady bezpečného spánku a vyhýbať sa nebezpečným plochám na spanie (o. i. hojdačiek, autosedačiek) a spaniu v spoločnej posteli.

Inteligentná ponožka Smart Sock od Owlet nenahrádza bezpečný spánok ani rodičovskú starostlivosť. Ubezpečte sa, že dodržiavate zásady bezpečného spánku a inteligentnú ponožku Smart Sock od Owlet používate ako pomôcku, ktorá vám okrem starostlivosti, bezpečia a lásky, ktoré sa vášmu bábätku dostávajú, pomôže zistiť, ako sa mu dari.

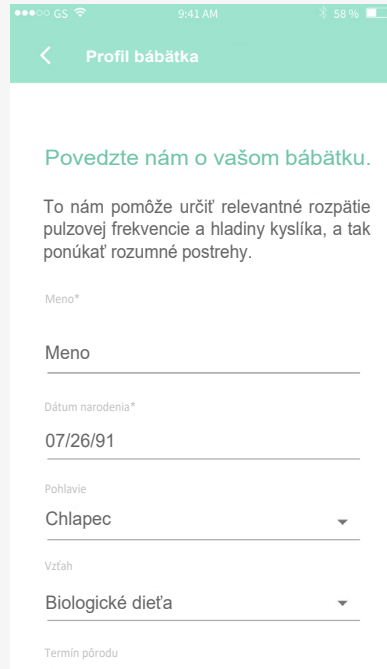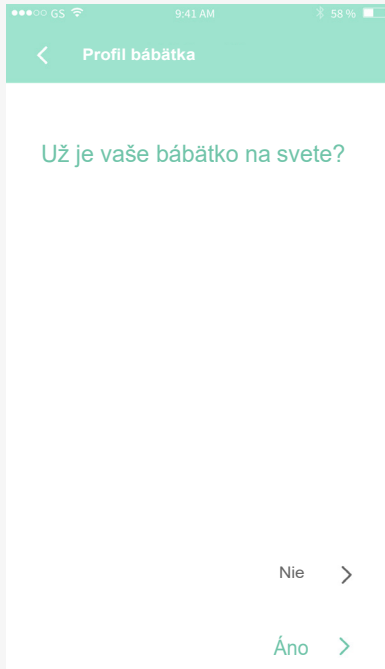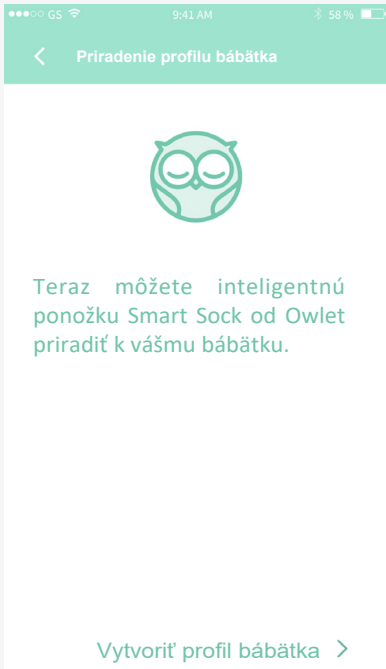

- ⑤ Vytvorte profil vášho bábätka. Aplikácia vám pomôže vytvoriť profil vášho bábätka a priradiť ho k zariadeniu Owlet.




Správna veľkosť inteligentnej ponožky Smart Sock a jej nasadenie

Inteligentná ponožka Smart Sock je dostupná v dvoch veľkostiach a pre každú veľkosť je k dispozícii ponožka pre pravú i ľavú nožičku:

Veľkosť 1 je vhodná pre bábätká s hmotnosťou do 5,4 kg.

Veľkosť 2 je vhodná pre bábätká s hmotnosťou 5,4 až 13,5 kg.

Veľkosť 3 je vhodná pre bábätká s hmotnosťou 13,5 až 24,9 kg.

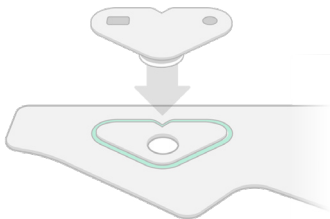

**Ponožky veľkosti 3 sú iba v balení inteligentnej ponožky Smart Sock Plus.*



Senzor pripevnite k látkovej ponožke

Obrys senzora zarovnajte s líniou na látke, senzor pritlačte k ponožke, aby sa pripevnil, a zacvaknite ho na miesto.

TIP:

Ak si nie ste istí vhodnou veľkosťou, začnite s menšou ponožkou.



Nasadte ponožku

Ponožku priložte k boku nožičky tak, aby sa senzor nachádzal za malíčkom.

Pásik zaistite pod prstami nôh, potom pásik členka omotajte okolo zadnej



časti členka a na priehlavku ho zaistíte.

Pri správnom umiestnení by mal pásik na priehlavku smerovať k palcu a senzor by sa mal nachádzať na malíčkovej hrane nožičky bábätka tak, aby hlava sovičky smerovala k prstom.



TIPY PRE POUŽITIE INTELIGENTNEJ PONOŽKY SMART SOCK 3 NA NOŽIČKÁCH BATOLIAT A DETÍ PREDŠKOLSKÉHO VEKU:

Batoľatá a deti predškolského veku sú oveľa pohyblivejšie a aktívnejšie ako dojčatá, preto by sme sa s vami chceli podeliť o zopár užitočných rád:

1. Inteligentnú ponožku Smart Sock nasadíte až potom, čo dieťa uložíte do postele, aby v nej čo najmenej chodilo. Pri chôdzi s nasadenou ponožkou sa môže poškodiť senzor.
2. Počkajte, až dieťa zaspí, až potom zapnite základňu. Tak zamedzíte žltým alarmom, ktoré by vás zbytočne upozorňovali na prevaľovanie dieťaťa pri zaspávaní. Základňu môžete zapnúť pomocou aplikácie alebo priamo na jednotke.
3. Ak vaše dieťa inteligentnú ponožku Smart Sock nikdy predtým nenosilo, môže váhať a klásť vám otázky. Dovoľte mu, aby si predtým, než mu ponožku nasadíte, zariadenie pozrelo a zvyklo si na neho.

Získavanie údajov a oznámení

Prv než si dieťa pôjde zdiemnuť alebo spať, inteligentnú ponožku Smart Sock vyberte zo základne a nasadte mu ju.

Svetlá základne začnú zeleno blikať, čo znamená, že zariadenie sa pokúša snímať hodnoty. Keď základňa začne získavať príslušné údaje, bude pulzovať zeleno.

Žltý alarm

Pri žltom alarme bude základňa stanice blikať žltou, hrať uspávanú hudbu a aplikácia vám pošle push oznámenie. Žltá farba signalizuje, že ponožka je zle nasadená alebo spadla z nožičky dieťaťa a zariadenie nedokázalo minimálne 60 sekúnd získať správne údaje.

Modrý alarm

Pri modrom alarme bude základňa stanice blikať modro, hrať uspávanú hudbu a aplikácia vám pošle push oznámenie. Modrá farba signalizuje, že ponožka je minimálne 60 sekúnd mimo dosahu základne, upozorňuje na vybitú batériu alebo blokovanie signálu.

Ľudské telo môže rušiť signál medzi základňou a ponožkou. Ak dieťa práve chováte, neotáčajte sa k základni chrbtom, aby ste predišli zbytočným oznámeniam. Ak sa modrý alarm spúšťa opakovane, ponožku a základňu posuňte bližšie k sebe, aby ste predišli opakovaným oznámeniam.

Červený alarm

Červená farba signalizuje oznámenie najvyššej priority. Základňa má k dispozícii tri druhy červených oznámení, pri ktorých bliká červeno a vydáva vysoký zvuk.

Nízka hladina kyslíka: Upozorní vás, ak hladina kyslíka u dieťaťa klesne pod 80 %.

Nízka pulzová frekvencia: Upozorní vás, ak pulzová frekvencia u dieťaťa klesne pod 60 úderov za minútu a hladina kyslíka klesne pod 85 %.

Vysoká pulzová frekvencia: Upozorní vás, ak pulzová frekvencia u dieťaťa prekročí 220 úderov za minútu.

TIP:

Ak má dieťa nasadenú ponožku počas kŕmenia, môže sa stať, že spustí červený alarm, lebo pri jedle prirodzene klesá obsah kyslíka a zvyšuje sa pulzová frekvencia.

Zastavenie zvuku oznámení

Zvuk akéhokoľvek aktívneho alarmu môžete krátkym stlačením tlačidla základne alebo pomocou aplikácie na 60 sekúnd zastaviť.

Zastavenie zastaví zvuk základne a aplikácie – svetelný krúžok bude na základni ďalej svietiť a v aplikácii budú k dispozícii podrobnosti. Alarm zostane aktívny, dokým sa stav nevyrieši.

Ak spúšťač (nízka hladina kyslíka, nízka alebo vysoká pulzová frekvencia) počas zastavenia prestane, alarm sa zastaví.

Ak pri zastavení dôjde k spusteniu nového alarmu s rovnakou alebo vyššou prioritou, tento alarm sa spustí bez ohľadu na zastavenie.

Základňa

Základňa inteligentnej ponožky Smart Sock pomocou nasledujúcich farebných svetiel signalizuje rôzne prevádzkové stavy:

Postupne bliká zeleno: Získavanie údajov

Pulzuje zeleno: Hodnoty sú v norme.

Bliká modro: Inteligentná ponožka Smart Sock je mimo dosahu základne, batéria je vybitá alebo niečo blokuje signál.

Bliká žltó: Inteligentná ponožka Smart Sock nie je správne nasadená alebo spadla z nožičky.

Bliká červeno: Pulzová frekvencia alebo hladina kyslíka je mimo stanoveného rozsahu.

Pulzuje bielo: Inteligentná ponožka Smart Sock sa nabíja.

Svieti bielo: Inteligentná ponožka Smart Sock je plne nabitá.

Postupne bliká bielo: Inteligentná ponožka Smart Sock nie je spárovaná.

Ako zapnúť monitorovanie a základňu?

Ak sa senzor nabíja, vyberte ho z nabíjacieho portu, alebo stlačte základňu a uvoľnite ju. Po stlačení základne sa ozve pípnutie a základňa sa rozsvieti zeleno.

Ako vypnúť základňu a monitorovanie?

Stlačte základňu a podržte ju, dokým nezhasne zelené svetlo a neozve sa pípnutie.

Nabíjanie inteligentnej ponožky Smart Sock

Inteligentnú ponožku Smart Sock položte na nabíjací port, ktorý sa nachádza na hornej strane základne a ubezpečte sa, že svetlo základne a ubezpečte sa, že svetlo základne svieti bielo.

Úroveň nabitia inteligentnej ponožky Smart Sock

Úroveň nabitia batérie inteligentnej ponožky Smart Sock môžete kontrolovať v aplikácii.



Ak svetlo základne pulzuje bielo, ponožka sa nabíja. Ak svieti bielo, ponožka je plne nabitá.

Upozornenie na slabú batériu inteligentnej ponožky Smart Sock

Ak aplikácia zistí, že batéria inteligentnej ponožky Smart Sock sa za menej ako hodinu vybije, upozorní vás na to modrým alarmom.


V tomto prípade však základňa nebude vydávať žiadny zvuk ani blikať.

Stav batérie môžete kedykoľvek zobraziť na stavovej obrazovke zariadenia.

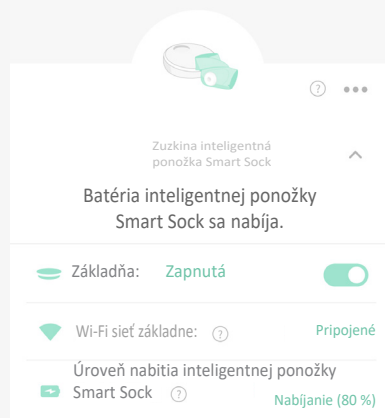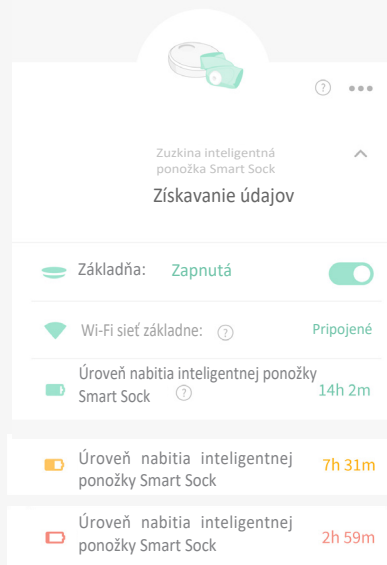

História


Na karte História v aplikácii sa zobrazujú posledné relácie spánku, údaje a alarmy. Základňa a aplikácia vyžadujú pri zobrazení Histórie pripojenie k Wi-Fi sieti.

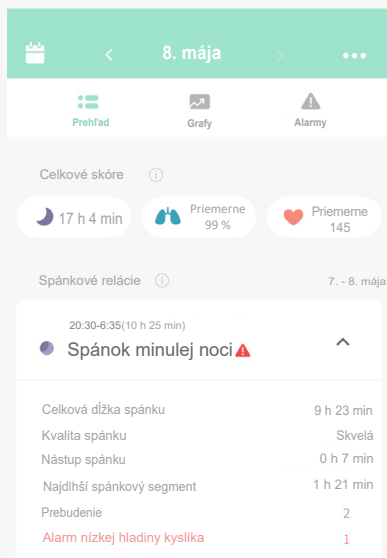

Grafy zobrazujú priemerné hodnoty pulzovej frekvencie, kyslíka a spánku za uplynulých 10 minút a aktualizujú sa každých 10 minút počas každého spánku.



Stiahnutím grafov dolu obnovíte údaje alebo zatvoríte a znova otvoríte aplikáciu. História uchováva údaje o posledných 30 reláciách spánku.

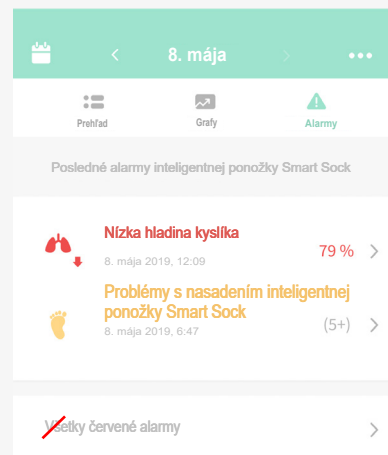

Po prebudení

Keď dieťaťu dáte dolu inteligentnú ponožku Smart Sock, vráťte ju do základne, aby sa mohla nabíjať.

Údržba a skladovanie inteligentnej ponožky Smart Sock

Druhú inteligentnú ponožku Smart Sock veľkosti, ktorú práve používate, skladujte na ľahko prístupnom mieste, aby ste ponožky mohli pravidelne striedať na oboch nožičkách. Druhú veľkosť si odložte pre budúce použitie.

Spoločnosť Owlet odporúča prať ponožku a senzor minimálne jedenkrát za dva týždne, aby sa zabránilo podráždeniu pokožky spôsobenému znečistenou ponožkou a senzorom. Ponožku a senzor perte ručne v jemnom pracom prípravku a studenej vode. Pred ďalším použitím ju nechajte úplne vyschnúť.

Ako vypnúť senzor inteligentnej ponožky Smart Sock

Senzor vyberte zo základne. Napájací kábel odpojte od základne. Stlačte a podržte tlačidlo základne a súčasne zasuňte napájací kábel. Držte tlačidlo základne, dokým sa svetlo základne nerozsvieti oranžovo a neozvú sa štyri pípnutia. Stlačte tlačidlo. Svetlo v ponožke zhasne. Ak chcete ponožku opäť zapnúť, senzor vložte do nabíjacieho portu základne.

Tipy a triky

Nasadenie inteligentnej ponožky Smart Sock

Nesprávne nasadená ponožka môže byť pre dieťa nepohodlná a na nožičke sa môžu objaviť červené škvrny, otlaky alebo pľuzgier. Ubezpečte sa, že dieťa má ponožku správnej veľkosti: je dôležité, aby ponožka dobre sedela a nebola tesná okolo prstov ani členka. Odporúčame pravidelne striedať pravú a ľavú ponožku.

Ak pokožka nožičky sčervenie, prestaňte na tejto nožičke ponožku používať a používajte ju na druhej nožičke, dokým sčervenenie úplne nezmizne.

Kam umiestniť základňu?

Základňa musí byť v dosahu používanej inteligentnej ponožky Smart Sock, aby nedochádzalo k zbytočnému spusteniu modrého alarmu. Dosah Bluetooth je až 30 m. Základňa má za úlohu vás v prípade červeného alarmu včas upozorniť, preto ju odporúčame umiestniť tak, aby ste ju vždy počuli.

Ako otestovať alarmy

Červený

Senzor vyberte zo základne a nechajte zapnuté monitorovanie. Stlačte a podržte základňu, dokým sa neozvú tri pípnutia, potom ju uvoľnite. Ak chcete zastaviť zvuk, znova stlačte základňu, alebo zvuk zastavte v aplikácii. Ak chcete zariadenie resetovať, stlačte a podržte základňu, dokým svetlo základne nezhasne a nezve sa pípnutie. Následným stlačením základňu opäť zapnite.

Modrý alarm

Senzor vyberte zo základne a nechajte zapnuté monitorovanie. Držte senzor a vzdialte sa od základne.

Žltý alarm

Senzor vyberte zo základne a nechajte zapnuté monitorovanie. Inteligentnú ponožku Smart Sock nasadte na nožičku dieťaťa alebo prst dospelého, dokým zariadenie nezíska údaj. Potom dajte ponožku dolu a chvíľu počkajte. To môže trvať až 60 sekúnd.


Ako zrušiť pripojenie k Wi-Fi sieti

Pomocou základne

Senzor vyberte zo základne. Stlačte a podržte tlačidlo základne a súčasne do základne zasunite napájací kábel. Držte tlačidlo základne, dokým sa svetlo základne nerozsvieti oranžovo a neozvú sa štyri pípnutia. Potom trikrát stlačte tlačidlo základne. Skontrolujte, či kontrolka Wi-Fi siete na spodnej strane základne svieti.

Máte doma neposedníka?

Dozeráme na vaše dieťa v každej situácii, ale niekedy sa tak vrtia, že senzor nedokáže získať potrebné údaje. V tomto prípade sa v aplikácii zobrazia kmitajúce nožičky. Pohyb má vplyv na kvalitu získaných údajov, takže namiesto zbytočného upozornenia sa snímania a oznámenia na chvíľu zastavia, dokým sa opäť nezistia kvalitné hodnoty.

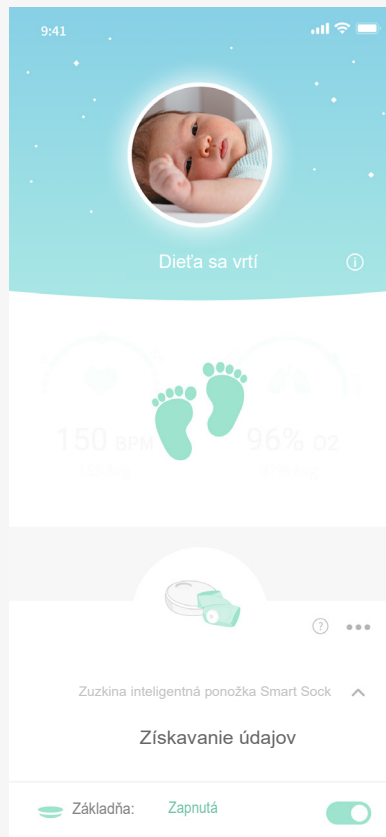


Funguje inteligentná ponožka Smart Sock aj pod detským oblečením?

Inteligentná ponožka Smart Sock je navrhnutá tak, aby sa pohodlne vošla pod pyžamko, zavinovačky a ponožky, a zaistila tak dieťaťu ničím nerušený spánok.

Zdieľanie prístupu k aplikácii

Spoločnosť Owlet pracuje na možnosti pridania viacerých účtov pre zdieľanie prístupu k aplikácii. Ak aplikáciu chcete zatiaľ zdieľať s priateľmi alebo s rodinou, stačí im oznámiť prihlasovacie údaje k vášmu účtu.

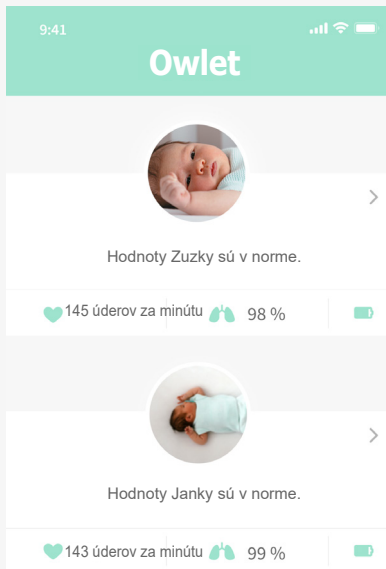

Viac detí? Žiadny problém!

Aplikácia Owlet podporuje založenie niekoľkých detských profilov a ku každému dieťaťu možnosť priradenia ľubovoľného zariadenia. Dbajte, aby každé dieťa malo svoju inteligentnú ponožku Smart Sock a príslušnú základňu, aby v prípade alarmu nedošlo k zámene.

Jas základne

Základňa je vybavená senzorom okolitého svetla a automaticky si upraví jas svetla podľa svetla v miestnosti.

Centrum pre nápoved' a podporu

V aplikácii prejdite do časti Účet > Nápoved' a podpora a kontaktujte náš tím zákazníckeho servisu prostredníctvom chatu v aplikácii, emailu alebo telefónu, alebo prejdite na stránku <http://support.owletcare.com/>. Ďalšie tipy a triky nájdete na karte Sprievodca v aplikácii.

Uskladnenie inteligentnej ponožky Smart Sock

Senzor inteligentnej ponožky Smart Sock obsahuje batériu, ktorá sa po dlhšom čase vybije. Ak sa batéria vybije úplne, dôjde k poškodeniu senzora.

6 krokov, ako uložiť senzor inteligentnej ponožky Smart Sock:

- 1. Senzor plne nabite.**
- 2. Senzor vyberte zo základne.**
- 3. Vypnite ponožku podľa pokynov na strane 20.**
- 4. Odpojte základňu od napájania.**
- 5. Senzor, základňu, káble, zástrčku a inteligentné ponožky Smart Sock uložte na chladné a suché miesto.**
- 6. Každých 6 mesiacov senzor dobite a potom zopakujte kroky 1–5.**

Záruka spokojnosti

Na každý výrobok Owlet platí 30-denná záruka pokojného spánku. Ak s výrobkom nie ste stopercentne spokojní, môžete ho do 30 dní od zakúpenia vrátiť. (Platí iba pre výrobky zakúpené na stránkach owletcare.com)

Záruka

OBMEDZENÁ ZÁRUKA

Zaručujeme, že ak budete naše výrobky používať v súlade s ich určeným použitím, naše výrobky nebudú mať chyby materiálu ani spracovania po dobu 1 roku od dátumu poskytnutia záruky v prípade nových výrobkov a 6 mesiacov v prípade repasovaných výrobkov. Na naše výrobky neposkytujeme záruku na bežné opotrebenie ani poškodenie následkom nesprávneho používania, úprav alebo nesprávnej údržby.

Ak sa domnievate, že ste dostali chybný výrobok, opravíme vám ho alebo vymeníme alebo jeho chybnú časť (chybné časti) v súlade s podmienkami tejto obmedzenej záruky. V prípade výmeny poskytujeme záruku do konca záručnej lehoty pôvodného výrobku.

Táto obmedzená záruka platí iba pre pôvodného kupujúceho výrobku a na výrobky kúpené priamo od nás alebo

od niektorého z našich autorizovaných predajcov, ak to nie je zákonom zakázané.

Naše výrobky máme právo predávať iba my a naši autorizovaní predajcovia, ktorí sú povinní dodržiavať naše zásady, postupy a štandardy riadenia kvality. Vyhradzuje si právo odmietnuť reklamácie výrobkov kúpených od neautorizovaných predajcov, vrátane výrobkov kúpených na neautorizovaných webových stránkach. Táto obmedzená záruka nezaručuje, že činnosť výrobku bude neprerušovaná alebo bezchybná.

Vezmite prosím na vedomie: Táto obmedzená záruka je jedinou dostupnou zárukou na naše výrobky.

Platnosť implicitných záruk, vrátane implicitných záruk predajnosti a vhodnosti na určitý účel, obmedzujeme na dobu trvania tejto obmedzenej záruky. V rozsahu povolenom zákonom sa zriekame všetkých ostatných záruk akéhokoľvek druhu. Niektoré štáty nepovoľujú

obmedzenia implicitných záruk, takže vyššie uvedené obmedzenia pre vás nemusia platiť.

Naša výhradná zodpovednosť za akúkoľvek chybu je uvedená v tejto obmedzenej záruke a vylučuje akékoľvek nároky na náhodné alebo následné škody. Niektoré štáty nepovoľujú vylúčenie alebo obmedzenie náhodných alebo žiadnych následných škôd, takže vyššie uvedené obmedzenia alebo vylúčenia pre vás nemusia platiť. Žiadna osoba ani subjekt nemá právo poskytovať v našom mene žiadnu inú záruku. Táto záruka vám zaručuje konkrétne zákonné práva. Môžete mať aj ďalšie práva, ktoré sa v jednotlivých štátoch líšia.

Napríklad zákazníci v niektorých jurisdikciách môžu mať zaručené ďalšie práva podľa platných vnútroštátnych právnych predpisov, ako je austrálsky zákon na ochranu spotrebiteľa alebo vnútroštátne právne predpisy podľa smernice ES 99/44. Táto obmedzená záruka nemá vplyv na žiadne takéto práva.

SKVarovanie / Dôležité bezpečnostné pokyny

VAROVANIE: Inteligentná ponožka Smart Sock od Owlet nie je zdravotnícka pomôcka.

Nie je určená na používanie ako zdravotnícka pomôcka ani na nahrádzanie zdravotníckej pomôcky. Neslúži a nie je určená na diagnostiku, liečenie, ošetrovanie, zmiernovanie ani na predchádzanie žiadnych chorôb ani zdravotných stavov, ani na vyšetrenie, nahradenie alebo úpravu anatómie alebo iného fyziologického procesu.

Inteligentná ponožka Smart Sock od Owlet je určená pre zdravé deti do veku 18 mesiacov, preto prahové hodnoty oznamovania na inteligentnej ponožke Smart Sock od Owlet nie sú také prísne ako u lekárskech monitorov.

Majte na pamäti, že: Tento výrobok je určený iba na to, aby vám pomáhal sledovať stav vášho dieťaťa, a nie je určený na to, aby nahradil starostlivosť o dieťa. Ste zodpovední za zdravie a dobré životné podmienky svojho dieťaťa a dodržiavanie zásad bezpečného spánku, zdravia a starostlivosti.

- Inteligentnú ponožku Smart Sock od Owlet nepoužívajte ako diagnostický nástroj.
- Nepoužívajte inteligentnú ponožku Smart Sock od Owlet, ak vám lekár odporučil používať lekárske pulzové oxymetry alebo lekárske monitory dychu.
- Inteligentnú ponožku Smart Sock od Owlet nepoužívajte ako výhovorku pri nebezpečných spánkových návykoch.
- Nepoužívajte inteligentnú ponožku Smart Sock od Owlet ako náhradu starostlivosti dospelých osoby o dieťa.

Záruka

Spoločnosť Owlet si za svojimi výrobkami hrdó stojí. Naše záruky nájdete na webovej stránke: <https://owletcare.com/pages/warranty>.

Obchodné podmienky

Používanie výrobkov spoločnosti Owlet podlieha podmienkam, ktoré nájdete na webovej stránke: <https://owletcare.com/pages/terms>. Používaním výrobku spoločnosti Owlet vyjadrujete súhlas s týmito podmienkami.

Kontaktné informácie pre váš región nájdete na webovej stránke: <https://support.owletcare.com>.

Bezpečnosť

Vaša bezpečnosť a bezpečnosť iných osôb je pre nás veľmi dôležitá. V tomto návode a v aplikácii Owlet Baby Care nájdete mnoho dôležitých bezpečnostných pokynov. Vždy si prečítajte všetky bezpečnostné upozornenia a dodržujte ich.



PRE BEZPEČNOSŤ VÁS A VÁŠHO DIEŤAŤA:

VŽDY, KEĎ SA OZVE ALARM, IHNEĎ ZAREAGUJTE.



VAROVANIE: ZÁKLADNÚ VŽDY UDRŽUJTE VO VZDIALENOSTI ASPOŇ 1 METRA OD DETSKEJ POSTIELKY, LEBO KÁBEL MÔŽE ZNAMENÁŤ NEBEZPEČENSTVO UŠKRTENIA.

INTELENTNÁ PONOŽKA SMART SOCK OD OWLET JE IBA POMÔCKOU.
NEHAHRÁDZA DOHĽAD DOSPELEJ OSOBY.

U PREDČASNE NARODENÝCH DETÍ, DETÍ NA PODPORNOU KYSLÍKU A DETÍ SO ZDRAVOTNÝM POSTIHŤMI KONSULTUJTE POUŽITIE INTELENTNEJ PONOŽKY SMART SOCK OD OWLET S VAŠIM LEKÁROM.



Zmeny alebo úpravy tohto zariadenia, ktoré výslovne neschválila strana zodpovedná za dodržiavanie predpisov, môžu viesť k strate oprávnenia používateľa na používanie tohto zariadenia. Používajte IBA dodaný napájací adaptér. V opačnom prípade môže dôjsť k zrušeniu našej obmedzenej záruky. Toto zariadenie sa testovalo a považuje sa za vyhovujúce limitom pre digitálne zariadenia triedy B podľa časti 15 pravidiel FCC. Tieto limity sú navrhnuté tak, aby poskytovali primeranú ochranu pred škodlivým rušením v obytných budovách. Toto zariadenie generuje, využíva a môže vyžarovať vysokofrekvenčnú energiu,

a ak nie je inštalované a používané v súlade s pokynmi výrobcu, môže rušiť rádiovú komunikáciu.

IC: 21386-OBL3A (základňa)

IC: 21386-OSS3A (senzor)

Toto zariadenie spĺňa časť 15 pravidiel FCC a vyhovuje bezlicenčným kanadským RSS bez výnimiek pre inovácie, vedu a ekonomický rozvoj. Používanie zariadenia podlieha nasledujúcim dvom podmienkam: (1) toto zariadenie nesmie spôsobovať rušenie a (2) toto zariadenie musí akceptovať každé rušenie vrátane rušenia, ktoré môže spôsobiť nežiaducu činnosť zariadenia.

CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)



Spoločnosť Owlet Baby Care vyhlasuje, že inteligentná ponožka Smart Sock od Owlet je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ.

Úplné znenie Vyhlásenia EÚ o zhode je k dispozícii na nasledujúcej webovej stránke: <https://owletbabycare.co.uk/pages/ce-compliance>

2 402-2 480 MHz (výstupný výkon 63 mW)

Bluetooth základne

2 412-2 462 MHz (výstupný výkon 75 mW)

Wi-Fi sieť základne

2 402-2 480 MHz (výstupný výkon 6,3 mW)

Bluetooth senzora



Spoločnosť Owlet sa zaviazala plniť požiadavky smernice 2012/19/EÚ o odpadových elektrických a elektronických zariadeniach (OEEZ). Viac informácií o správnej likvidácii výrobkov Owlet v rámci Európskej únie a vo Veľkej Británii nájdete na našich webových stránkach.

VSTUP: 100-240 V~0,2 A
50-60 Hz

VÝSTUP: 5V, 1A



800433

Spĺňa požiadavky normy UL 62368-1 a CAN/CSA-C22.2 č. 62368-1



Americký patent č. 9,693,730 a 10,449,837.
Prebieha konanie o udelení ďalších patentov.





Owlet

Pre pokojný spánok ®

Záruka a zrieknutie sa zodpovednosti

Informácie o obmedzenej záruke a zrieknutí sa zodpovednosti

Obmedzená záruka | Zrieknutie sa zodpovednosti a príslušnosť súdu

OBMEDZENÁ ZÁRUKA

Spoločnosť Owlet zaručuje, že inteligentná ponožka Smart Sock™ 2 od Owlet nebude pri bežnom používaní a údržbe vykazovať chyby materiálu ani spracovania po dobu jedného (1) roku od dátumu nákupu, ktorý je uvedený na doklade o nákupe. Táto obmedzená záruka sa poskytuje iba pôvodnému kupujúcemu tejto inteligentnej ponožky Smart Sock 2 od Owlet.

Spoločnosť Owlet môže podľa svojho uváženia nekválnu inteligentnú ponožku Smart Sock 2 od Owlet alebo jej chybný diel (chybné diely) opraviť alebo vymeniť v súlade s podmienkami tejto obmedzenej záruky. Pre náhradný výrobok platí záruka iba do konca platnej záručnej lehoty pôvodného výrobku. Táto obmedzená záruka neplatí v prípadoch, keď bol detský monitor Owlet poškodený následkom nesprávneho používania, úprav alebo nesprávnej údržby. Táto obmedzená záruka je jedinou zárukou pre inteligentnú ponožku Smart Sock 2 od Owlet. Nikto nemá právo poskytovať v mene spoločnosti Owlet žiadnu inú záruku. Niektoré štáty neumožňujú obmedziť dobu trvania implicitnej záruky alebo vylúčiť náhodné alebo následné škody, takže tieto obmedzenia a vylúčenia pre vás nemusia platiť. Táto obmedzená záruka vám zaručuje určité zákonné práva a v závislosti od zákonov vášho štátu môžete mať zaručené aj ďalšie práva.

ZRIEKNUTIE SA ZODPOVEDNOSTI A PRÍSLUŠNOSŤ SÚDU

Inteligentná ponožka Smart Sock od Owlet a aplikácia Owlet majú slúžiť ako pomôcky pri starostlivosti o dieťa a nie sú určené na to, aby nahradili dohľad alebo sa používali bez dohľadu zodpovednej dospeljej osoby.

Používaním inteligentnej ponožky Smart Sock 2 od Owlet používateľ súhlasí a potvrdzuje, že spoločnosť Owlet Baby Care Inc. vrátane jej zástupcov, zamestnancov, investorov a členov nenesie zodpovednosť za žiadne straty, škody na majetku ani za zranenie osôb, ktoré vzniknú v súvislosti s používaním detského monitora od Owlet, a to bez ohľadu na príčinu.

Inteligentná ponožka Smart Sock 2 od Owlet je určená pre zdravé deti, preto prahové hodnoty pre spustenie alarmu na inteligentnej ponožke Smart Sock 2 od Owlet nie sú také prísne ako u lekárskeho monitorov.

Upozornenie:

- Inteligentnú ponožku Smart Sock 2 od Owlet nepoužívajte ako diagnostický nástroj.
- Nepoužívajte inteligentnú ponožku Smart Sock 2 od Owlet, ak vám lekár odporučil používať lekársky pulzový oxymeter.
- Nepoužívajte inteligentnú ponožku Smart Sock 2 od Owlet, ak vám lekár odporučil používať lekársky monitor dychu.
- Inteligentnú ponožku Smart Sock 2 od Owlet nepoužívajte ako výhovorku pri nebezpečných spánkových návykoch.

Používaním inteligentnej ponožky Smart Sock 2 od Owlet používateľ súhlasí a potvrdzuje, že všetky spory vzniknuté v súvislosti s jej používaním sa budú riešiť v tretom súdnom okrese Salt Lake County, štát Utah, Spojené štáty americké.

PREČÍTAJTE SI TENTO NÁVOD NA POUŽÍVANIE

V návode na používanie nájdete mnoho užitočných rád, ako správne používať a starať sa o inteligentnú ponožku Smart Sock 2 od Owlet. Riešenie niektorých problémov nájdete v sekcii Riešenie problémov. Ak si najprv prečítate tipy na riešenie problémov, možno sa na nás nebudete musieť obrátiť so žiadosťou o pomoc. Kompletné informácie o nastavení a používaní výrobku nájdete na webovej stránke www.owletcare.com/setup.

PREČÍTAJTE SI BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE

Vaša bezpečnosť a bezpečnosť iných osôb je pre nás veľmi dôležitá. V tomto návode a v aplikácii Owlet Baby Care nájdete mnoho dôležitých bezpečnostných pokynov. Vždy si prečítajte všetky bezpečnostné pokyny a dodržujte ich.



Tento symbol v tomto návode na používanie upozorňuje na dôležité bezpečnostné informácie! Všetky bezpečnostné informácie budú nasledované výstražným symbolom a slovom „NEBEZPEČENSTVO“, „VAROVANIE“, „POZOR“ alebo „UPOZORNENIE“. Tieto slová znamenajú:

NEBEZPEČENSTVO = Bezprostredne hroziaca nebezpečná situácia, ktorá môže mať za následok smrť alebo vážne zranenie osôb.

VAROVANIE = Potenciálne nebezpečná situácia, ktorá môže mať za následok smrť alebo vážne zranenie osôb alebo poškodenie majetku.

POZOR = Bezprostredne hroziaca nebezpečná situácia, ktorá môže mať za následok smrť alebo vážne zranenie osôb.

UPOZORNENIE = Nebezpečná situácia, ktorá by mohla viesť k iným následkom ako zraneniu osôb, napr. k poškodeniu majetku.

VAROVANIE A DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE

VAROVANIE: Inteligentná ponožka Smart Sock 2 nie je zdravotnícka pomôcka.



Ponožka Smart Sock 2 od Owlet vás upozorní, ak puťová frekvencia alebo hladina kyslíka v krvi dieťaťa sú mimo stanoveného rozsahu. Ponožka Smart Sock 2 je určená pre novorodencov do osemnástich (18) mesiacov, nie pre deti staršie ako osemnásť (18) mesiacov. Inteligentná ponožka Smart Sock 2 od Owlet nie je zdravotnícka pomôcka. Inteligentná ponožka Smart Sock 2.

- Nie je určená na diagnostiku, liečbu, zmiernenie, monitorovanie, liečenie ani predchádzanie žiadnej choroby ani zranenia.
- Neovplyvňuje funkciu ani štruktúru tela.
- Primárne určený účel nedosahuje pôsobením chemických látok.
- Nezabraňuje syndrómu náhleho úmrtia novorodencov (SNUK).

Prímáym účelom tohto návodu na používanie je: Používateľovi poskytnúť základné pokyny a rady pre správnu inštaláciu a používanie inteligentnej ponožky Smart Sock 2 od Owlet a vysvetliť funkcie, obsluhu, bezpečnostné opatrenia, údržbu a riešenie problémov s inteligentnou ponožkou Smart Sock 2 od Owlet. Je nevyhnutné, aby všetky osoby, ktoré majú túto inteligentnú ponožku Smart Sock 2 používať alebo nastavovať, si pozorne prečítali návod na používanie, aby pochopili, ako inteligentnú ponožku Smart Sock 2 od Owlet správne používať, a aby tieto pokyny dodržiavali.

Ak týmito pokynom nerozumiete, ihneď nás kontaktujte na e-mailovej adrese contact@owletcare.com alebo na telefónnom čísle 1 844 334-5330 v čase Po-So od 7:00 do 21:00.

PRE BEZPEČNOSŤ VÁS A VÁŠHO DIETAŤA



- ZÁKLADŇU VŽDY UDRŽUJTE VO VZDIALENOSTI ASPOŇ 1 METRA OD DETSKEJ POSTIELKY, LEBO KÁBEL MÔŽE ZNAMENÁŤ NEBEZPEČENSTVO UŠKŔTENIA.
- INTELIGENTNÁ PONOŽKA SMART SOCK 2 OD OWLET JE IBA POMÔCKOU. NENAHRÁDZA DOHLAD DOSPELEJ OSOBY.
- U PREDČASNE NARODENÝCH DETÍ, DETÍ NA PODPORNOU KYSLÍKU A DETÍ SO ZDRAVOTNÝM POSTIHNUTÍM KONZULTUJTE POUŽITIE INTELIGENTNEJ PONOŽKY SMART SOCK 2 OD OWLET S VAŠIM LEKÁROM.
- VŽDY, KEĎ SA OZVE ALARM, IHNEĎ ZAREAGUJTE.

VYHLÁSENIE O ZHODE S FCC



Zmeny alebo úpravy tohto zariadenia, ktoré výslovne neschválila strana zodpovedná za dodržiavanie predpisov, môžu viesť k strate oprávnenia používateľa na používanie tohto zariadenia. Používajte IBA dodaný napájací adaptér. V opačnom prípade môže dôjsť k zrušeniu našej obmedzenej záruky. Toto zariadenie sa testovalo a považuje sa za vyhovujúce limitom pre digitálne zariadenia triedy B podľa časti 15 pravidiel FCC.

Tieto limity sú navrhnuté tak, aby poskytovali primeranú ochranu pred škodlivým rušením v obytné budove. Toto zariadenie generuje, využíva a môže vyžarovať vysokofrekvenčnú energiu, a ak nie je inštalované a používané v súlade s pokynmi výrobcu, môže rušiť rádiovú komunikáciu.



Toto zariadenie vyhovuje bezlicenčným kanadským RSS bez výnimiek pre inovácie, vedu a ekonomický rozvoj. Používanie zariadenia podlieha nasledujúcim dvom podmienkam: (1) toto zariadenie nesmie spôsobovať rušenie a (2) toto zariadenie musí akceptovať každé rušenie vrátane rušenia, ktoré môže spôsobiť nežiaducu činnosť zariadenia.

Riešenie problémov

Základné nastavenia | Alarmy | Pripojenie

Základné nastavenia

Problém	Príčiny	Riešenie
<ul style="list-style-type: none">■ Pri nastavení nevidím Wi-Fi sieť inteligentnej ponožky Smart Sock 2.	<ul style="list-style-type: none">■ Základňa nie je zapnutá.■ Základňa je už pripojená k Wi-Fi sieti inteligentnej ponožky Smart Sock 2.■ Základňa je mimo dosahu.	<ul style="list-style-type: none">■ Základňu zapojte do zásuvky.■ Skontrolujte, či kontrolka Wi-Fi siete na spodnej strane základne svieti. Ak áno, tento krok preskočte a pokračujte v založení vášho účtu v aplikácii.■ Základňu umiestnite bližšie k Wi-Fi routeru.
<ul style="list-style-type: none">■ V aplikácii Owlet nevidím našu domácu Wi-Fi sieť.	<ul style="list-style-type: none">■ Váš router využíva frekvenčné pásmo 5 GHz (výrobok Owlet podporuje iba 2,4GHz pásmo).■ Možno máte skrytý router.	<ul style="list-style-type: none">■ Skontrolujte, či zariadenie iOS je pripojené k 2,4GHz sieti (väčšina 5GHz routerov podporuje 2,4GHz sieť).■ Pokyny pre skryté routery nájdete na owletcare.com/support.
<ul style="list-style-type: none">■ Základňu nejde pripojiť k domácej Wi-Fi sieti.	<ul style="list-style-type: none">■ Nesprávne heslo■ Základňa je mimo dosahu Wi-Fi routera.■ Vaša domáca Wi-Fi sieť nefunguje.	<ul style="list-style-type: none">■ Skontrolujte heslo k vašej sieti.■ Pred nastavením umiestnite základňu bližšie k routeru a po dokončení nastavenia základňu odnesť späť do detskej izby.■ Skúste reštartovať telefón a znova sa pripojiť k Wi-Fi sieti.■ Resetujte váš Wi-Fi router.
<ul style="list-style-type: none">■ Základňa po odpojení inteligentnej ponožky Smart Sock svieti bielo.	<ul style="list-style-type: none">■ Prebieha aktualizácia softvéru.	<ul style="list-style-type: none">■ Inteligentnú ponožku Smart Sock opäť pripojte k základni, dokým aktualizácia nebude dokončená.
<ul style="list-style-type: none">■ Základňu nejde spárovať s mojim účtom Owlet.	<ul style="list-style-type: none">■ Základňa a vaše zariadenie iOS nie sú pripojené k rovnakej Wi-Fi sieti.■ Podržanie malého tlačidla „Registrácia“	<ul style="list-style-type: none">■ Overte, či základňa a vaše zariadenie iOS sú pripojené k rovnakej Wi-Fi sieti.■ Stlačte a uvoľnite (nedržte) malé tlačidlo „Registrácia“ na spodnej strane základne a zopár sekúnd počkajte, než sa znova pokúsite spárovať váš účet Owlet.■ Vaše zariadenie iOS pripojte k rovnakej 2,4GHz Wi-Fi sieti, ku ktorej je pripojená základňa.

*Potrebujete technickú podporu? Kontaktujte nás na e-mailovej adrese contact@owletcare.com alebo na telefónnom čísle +1 (844) 334-5330 v čase Po-So od 7:00 do 21:00.

Na všeobecné otázky vám radi odpovieme na našom chate owletcare.com/chat.

Alarmy

Problém	Príčiny	Riešenie
<ul style="list-style-type: none"> Základňa bliká modro a pípa. 	<ul style="list-style-type: none"> Základňa je mimo dosahu inteligentnej ponožky Smart Sock. Telo rodiča alebo inej osoby starajúcej sa o bábätko blokuje spojenie medzi inteligentnou ponožkou Smart Sock a základňou. To sa bežne stáva pri kŕmení, výmene plienok, maznaní a pod. Slabá alebo vybitá batéria 	<ul style="list-style-type: none"> Základňu umiestnite bližšie k inteligentnej ponožke Smart Sock. Zmeňte polohu bábätka alebo zväzťe, či pri kŕmení, výmene plienok, maznaní a pod. nevypnete monitorovanie. Nabite inteligentnú ponožku Smart Sock.
<ul style="list-style-type: none"> Základňa bliká červeno a pípa. 	<ul style="list-style-type: none"> Nízka alebo vysoká pulzová frekvencia Nízka hladina kyslíka Inteligentná ponožka Smart Sock nesedí na nožičke. 	<ul style="list-style-type: none"> Ubezpečte sa, že obrys senzora na vonkajšej strane chodidla bábätka je 1-2 mm za maličkom. Ubezpečte sa, že inteligentná ponožka Smart Sock prilieha k nožičke (ak nie, inteligentná ponožka ťažko získava údaje. Môže sa zbytočne spustiť alarm.) Ubezpečte sa, že senzory sú zarovnané v okienkach látkovej ponožky. Zväzťe, či nepoužívate inú veľkosť látkovej ponožky.
<ul style="list-style-type: none"> Základňa bliká žltá a pípa. 	<ul style="list-style-type: none"> Problémy so získavaním údajov Inteligentná ponožka Smart Sock nie je správne nasadená. Svetlo v miestnosti je príliš jasné. 	<ul style="list-style-type: none"> Ubezpečte sa, že obrys senzora na vonkajšej strane chodidla bábätka je 1-2 mm za maličkom. Ubezpečte sa, že inteligentná ponožka Smart Sock prilieha k nožičke (ak nie, inteligentná ponožka ťažko získava údaje a môže sa zbytočne spustiť alarm). Ubezpečte sa, že senzory sú zarovnané v okienkach látkovej ponožky. Stimte svetlo v miestnosti.

Pripojenie

Problém	Príčiny	Riešenie
<ul style="list-style-type: none"> Základňa nie je pripojená k internetu. 	<ul style="list-style-type: none"> Základňa je mimo dosahu Wi-Fi routera. Vaša domáca Wi-Fi sieť nefunguje. 	<ul style="list-style-type: none"> Základňu a Wi-Fi router umiestnite bližšie k sebe (zosilňovače Wi-Fi ani ďalšie routery problém nevyriešia). Resetujte váš Wi-Fi router.
<ul style="list-style-type: none"> Inteligentná ponožka Smart Sock sa nenabíja. 	<ul style="list-style-type: none"> Inteligentná ponožka Smart Sock nie je úplne zapojená. Inteligentná ponožka Smart Sock vyžaduje resetovanie. 	<ul style="list-style-type: none"> Nechajte inteligentnú ponožku Smart Sock nabíjať, dokým sa neozve cvaknutie a nezačne zeleno blikat. Vypnite a znova zapnite elektronicú súčiastku inteligentnej ponožky Smart Sock.
<ul style="list-style-type: none"> Namiesto údajov o pulzovej frekvencii a hladine kyslíka vidno pomlčky. 	<ul style="list-style-type: none"> Inteligentná ponožka Smart Sock sa snaží získať spoľahlivé údaje. Bábätko príliš pohybuje nožičkou. Nesprávne nasadená inteligentná ponožka Smart Sock Zle padnúca látková ponožka 	<ul style="list-style-type: none"> Ubezpečte sa, že senzory sú zarovnané v strede okienok látkovej ponožky. Dieťa nedávajte do kolisky ani na vibračnú podložku, mohlo by sa narušiť správne fungovanie zariadenia. Skontrolujte, či je inteligentná ponožka Smart Sock správne nasadená. Skontrolujte, či ste použili vhodnú veľkosť látkovej ponožky.

Tipy pre zdravé prostredie počas spánku

Radi by sme sa s vami podelili o niekoľko tipov, ako bábätku zaistiť zdravý a bezpečný spánok.

- Bábätko by malo byť v postielke samo a ležať na chrbte. Spanie na boku alebo na brušku nie je pre bábätko bezpečné.
- Dbajte, aby ste s bábätkom nezaspali vo vašej posteli, na pohovke alebo v kresle.
- Pre bábätko kúpte postielku, ktorá spĺňa platné bezpečnostné normy. Kúpte aj pevný matrac, ktorý do postielky dobre pasuje a oblečte ho do dobre priliehajúcej posteľnej bielizne.
- Nikdy nenechávajte bábätko spať na mäkkom povrchu, napr. v posteli pre dospelých alebo pre deti, na pohovke, v kresle, na vodnej posteli, vankúši, vankúšiku, prikrývke, ovčom rúne a podobných predmetoch.
- Do postielky neumiestňujte žiadne mäkké, voľne ležiace alebo ťažké predmety. To znamená vankúše, deky, prikrývky, ochranné obloženie do detskej postielky, plyšáky, hračky a všetky mäkké predmety.
- Nepoužívajte vankúše, polohovacie klíny ani fixačné podložky na podopretie bábätko, udržanie bábätko na chrbte alebo aby ste mu zabránili v otočení.
- Namiesto klasickej prikrývky použite dojčenskú prikrývku, ktorá sa dá zapnúť ako odev, alebo podobnú prikrývku, ktorá bábätko udrží v teple a bezpečí.
- Dbajte, aby sa bábätko nadmerna nezahrialo. Bábätko obliekajte ľahké pyžamko a v miestnosti udržiavajte teplotu, ktorá je príjemná pre ľahko oblečeného dospelého.
- S bábätkom zdieľajte izbu, ale nie posteľ! Bábätko by malo spať v samostatnej postielke blízko vašej posteľe. Bude tak v bezpečí a kŕmenie bude jednoduchšie. Keby bábätko spalo s vami, inteligentná ponožka Smart Sock nebude správne fungovať. Vaše telo by totiž rušilo bezdrôtový signál ponožky.
- Zvážte, či bábätko počas odpoľudňajšieho a večerného spánku nedáte cumlík. Dojčatám cumlík dávajte až vo veku 3-4 týždňov, až si zvyknú na dojčenie.
- O týchto zásadách bezpečného spánku poučte všetkých, ktorí sa budú o bábätko starať!